

GUIDE RAPIDE D'UTILISATION



Allumer l'analyseur et
les blocs chauffants.




Centrifuger les tubes
avant le début de la
manipulation.


Écouvillon : Immerger
l'écouvillon dans le gros tube
tampon et couper la tige de
l'écouvillon pour pouvoir
fermer le tube et vortexer.

LBA : Prélever **deux volumes**
de 25µL de LBA à l'aide de la
pipette orange munie d'un
cône à filtre. Déposer ce
volume dans le gros tube
tampon et vortexer.

1

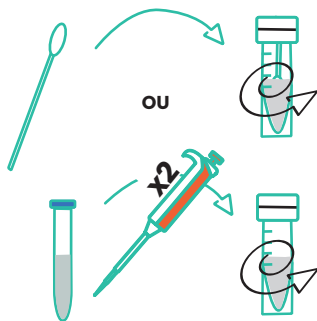


2

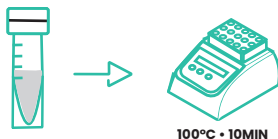

Insérer le tube tampon dans
l'incubateur 100°C pendant 10
minutes.

3

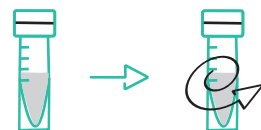

REPOS • 5MIN

Laisser reposer le tube 5
minutes à température
ambiante puis vortexer.

4



Prélever un volume de 25µL du tube tampon à l'aide de la pipette orange munie d'un cône à filtre.


Déposer ce volume dans le tube de tampon blanc et vortexer.

5




Déposer un volume de 25µL du tube de tampon blanc dans chaque minitube à l'aide de la pipette orange munie d'un cône à filtre.

6

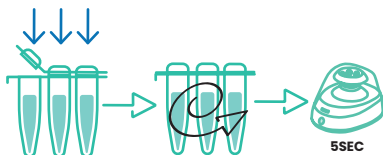

Bien fermer les **minitubes** et les vortexer puis les insérer dans la centrifugeuse pendant 5 secondes.

7

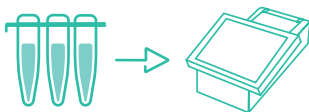

Insérer les **minitubes** dans l'analyseur (en plaçant le détrompeur à gauche) puis refermer immédiatement le capot de l'analyseur et lancer l'analyse.



Ne jamais réouvrir les minitubes une fois la réaction démarrée, ni après la fin de celle-ci. Ne pas laisser les minitubes dans l'analyseur une fois la réaction terminée.

Se référer au manuel d'utilisation pour des informations plus détaillées :

Contact : +33 (0)1 73 21 78 21 • support@enalees.com



<https://bit.ly/Manuel-Enalees>